

品名 リフト付シャワーキャリー

規格 LS-500

#### 仕様機能面

1. 浴槽のレールに接続し、シートを浴槽上へスライドさせ、ご利用者を簡単に入浴させることができます。
2. 座面をフックで引っ掛け吊り上げるなどの操作がありませんので、ご利用者をスピーディに入浴させることができます。
3. またぎサポートにより浴槽との移動時に足元を支えることなく、楽に介助がおこなえます。
4. チルト機能により、リラックスして入浴することができます。
5. 組み立て方により、左仕様、右仕様に組み立てられます。

#### 操作性

1. 駆動部左右にある（どちらか一方の）昇降スイッチを押すだけで、シート of 昇降が行え、スイッチを押している間だけ動きます。
2. 後輪のブレーキレバーを前に倒すと、後2輪とも同時にブレーキがかかります。
3. ヘッドサポートは、左右のツマミを緩めると高さ調節や取り外しが可能です。

#### 安全性

1. キャリーをレールの上でスライドさせても、ストッパーで脱落を防止しますので安全です。
2. 万が一故障等により動かなくなった場合は、非常スイッチでシートを昇降させることができます。